


Brugervejledning til CONFORM Luftpudsystem

Conform siddepuder og madrassystem - trykaflastning og forebyggelse af siddesår

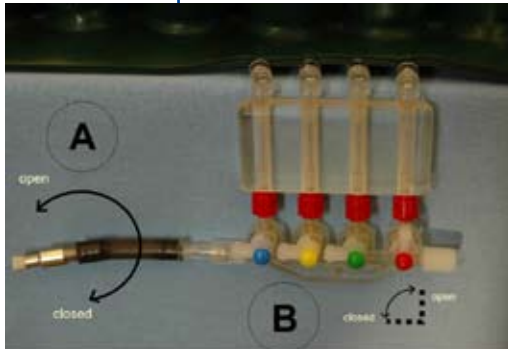

Fastgør den medfølgende pumpes slage til pudens ventil.

Åbn ventilen ved at dreje den mod uret og fyld puden men luft indtil den begynder at bue.

Luk ventilen ved at skrue den i retning med uret.

Lad brugeren sætte sig på puden og luk lidt luft ud, indtil brugeren synker godt ned i puden.



Vær opmærksom på, at brugerens bagdel ikke rører pudens fundament.

Afstanden mellem pudens fladeste punkt (ofte ved brugerens sædeknode) og pudens fundament bør være ca. 2 cm.

Hvis puden er fyldt korrekt, er tommelfingerregelen, at man let skal kunne presse en hånd ind mellem brugerens bagdel og pudevunden.

Vedligeholdelse

Det anbefales kun at anvende Conform-betræk til Conformpuden (ellers mindskes pudens fleksibilitet). Puden kan vaskes ved 60°C, men betrækket kun ved 30 °C (skånevask). Kontrollér at pudens ventiler er lukkede under vaskeprocessen, idet der ikke må trænge vand ind.

Kravene til opbevaring, rengøring og vedligeholdelse svarer til DIN 7716.

Conform luftpudsystem har en fabriksgaranti på 2 år.

Conform puderne opfylder alle krav til medicinske produkter som foreskrevet i 93/42/EWG.

